

【血液凝固コントロール血漿の参考値および参考値の範囲】

別紙 3

ドライヘマト PT 試薬について、以下 3 点の場合、コントロール血漿同梱の参考値ではなく、下表の該当する製品と該当する製造番号の参考値をご使用いただきますようお願い申し上げます。

- ・別紙 2 により装置 CG02 へ補正数値を入力して測定する場合（通常測定）※
- ・別紙 4 により装置 CG02N へ二次元コードのロット情報を登録して測定する場合
- ・正しいロット情報を入力したロットカードを同梱した製品（「★新ロットカード」と外箱裏面ラベルに表示のキット）を用いる場合

対象製品※

製品コード	製品名
240161	ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿 レベル 1
240163	ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿 レベル 2
240165	ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿 レベル 3

測定項目：PT

参考値および参考値の範囲

コントロール血漿	製造番号 Lot No.	使用期限	PT 参考値 (秒)	参考値の範囲 (秒)	参考値 PT-INR	参考値の範囲 PT-INR
レベル 1	193	2023.12	11.7	9.9 - 13.5	1.11	0.83 - 1.43
	195	2024.01	11.5	9.8 - 13.2	1.08	0.82 - 1.37
	199	2024.05	11.3	9.6 - 13.0	1.05	0.79 - 1.34
	201	2024.07	11.5	9.8 - 13.2	1.08	0.82 - 1.37
	202	2024.07	11.3	9.6 - 13.0	1.05	0.79 - 1.34
	203	2024.08	10.3	8.8 - 11.8	0.89	0.68 - 1.13
	207	2024.12	10.3	8.8 - 11.8	0.89	0.68 - 1.13
	208	2024.12	10.9	9.3 - 12.5	0.98	0.75 - 1.25
	213	2025.03	10.9	9.3 - 12.5	0.98	0.75 - 1.25
	216	2025.04	10.6	9.0 - 12.2	0.94	0.71 - 1.20
	218	2025.06	10.6	9.0 - 12.2	0.94	0.71 - 1.20
219	2025.07	11.2	9.5 - 12.9	1.03	0.78 - 1.32	
レベル 2	168	2024.07	19.6	15.7 - 23.5	2.72	1.85 - 3.72
	170	2024.10	20.9	16.7 - 25.1	3.04	2.06 - 4.17
	177	2025.03	23.2	18.6 - 27.8	3.64	2.48 - 4.97
	180	2025.04	18.5	14.8 - 22.2	2.46	1.67 - 3.37
	181	2025.06	18.5	14.8 - 22.2	2.46	1.67 - 3.37
レベル 3	130	2024.06	28.3	21.2 <	5.13	3.11 <
	134	2025.03	28.3	21.2 <	5.13	3.11 <
	136	2025.06	28.3	21.2 <	5.13	3.11 <

※ソウカンケイの 6) C.P. を 1)ON として C.plasma モードで測定する場合も該当する。

※対象製品の使用方法、注意事項、貯法及び使用期限に変更はありません。

※測定項目 APTT、APTT-2、Fib、の参考値に変更はありません。

上記に記載以外の製造番号をお使いの際は、お問い合わせ窓口へご連絡ください。

【お問い合わせ窓口】

株式会社エイアンドティー

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2023番地1

TEL 0120-285-027（日祝日を除く 9:00～17:00）